

“雷速”酸性洗腎液 SB-1080
“Renasol” Acid Concentrate, Part A. SB-1080
(衛署藥輸字第 021212 號)

型號：SB-1080

包裝：5000 公撮以下瓶裝

適應症：配合洗腎機及人工腎臟，用以清洗腎臟病病人之血中尿毒。

簡介：本製劑與 Renal BC-1 系列重碳酸鈉濃縮液配製成 36.83 倍的稀釋液使用於洗腎機上，使用前須先參考洗腎機製造廠的指示，每份 36.83 倍的稀釋液是由一份本製劑混合 1.83 份重碳酸鈉濃縮液再加上 34 份的純水 (ANSI/AAMI 或同等級)所製成，一瓶配製好的洗腎液應含有下列成份：

最終透析用濃度

A 部分/B 部分/水

鈉-----	140.0mEq/L
鈣-----	3.0mEq/L
鉀-----	1.0mEq/L
鎂-----	1.0mEq/L
氯-----	106.0mEq/L
醋酸鹽-----	4.0mEq/L
重碳酸鹽-----	35.0mEq/L
葡萄糖-----	200.0mEq/L
洗腎液傳導度	13.75ms/cm
	@25°C

A 部分酸性濃縮液包含下列化學成份：

濃縮液	洗腎液 (稀釋 1:35.83)
氯化鈉---174.3GM/L-----	4.70GM/L
氯化鈣-----8.1GM/L-----	0.22GM/L
氯化鉀-----2.7GM/L-----	0.07GM/L
氯化鎂-----3.7GM/L-----	0.10GM/L
醋酸-----8.8GM/L-----	0.24GM/L
葡萄糖---73.7GM/L-----	2.00GM/L
傳導度-----	150.0(ms/cm)
	@25°C

賦形劑：Purified water

注意事項：

1. 本製劑須與 Renal System 的 BC-1 系列濃縮液配合使用，該濃縮液是由氯化鈉與重碳酸鈉組成。
2. 二種濃縮液的使用比例在作洗腎前須先確認清楚。
3. 保存在華氏 40-90 度間，不可冷凍。
4. 使用前須混合徹底。
5. 不用時，容器口需封緊。
6. 包裝破損則勿使用。
7. 適用於作重碳酸透析用洗腎機，非直接使用於人體。
8. 不可使用於 COBE 洗腎機上。

類別：本藥限由醫師處方使用

藥商名稱：佳醫健康事業股份有限公司
地 址：新北市中和區中正路 880 號 17 樓

製造廠名稱：Medivators Inc.
地 址：14605 28th Avenue North
Minneapolis, Minnesota 55447,
USA

『雷速』重碳酸鹽液，BC-1-L
“Renasol” Liquid Bicarbonate Concentrate, Part B, BC-1-L
(衛署藥輸字第 021212 號)

型 號：BC-1-L

包 裝：每桶 3.78 公升

用 途：配合洗腎機及人工腎臟，用以清洗腎臟病人之血中尿毒。

簡介：本製劑與 “Renasol”SB-1000 系列酸性洗腎液及純水配製成 36.83 倍之稀釋液使用於洗腎機上。

化學成分含量：

氯化鈉.....23.53Gm/L

重碳酸鈉.....65.95 Gm/L

賦 形 劑：Purified water

※本藥限由醫師使用※

注意事項：

1. BC-1-L 重碳酸液只可與 Renal System SB-1000 酸性濃縮液系列配合，稀釋成 1 :36.83 之混合液使用於作重碳酸透析之洗腎機上。
2. 洗腎前請參考洗腎機操作手冊說明。
3. 包裝損壞則勿使用。避免冷藏及存放於高溫處。
4. 不可使用於 Cobe 洗腎機上。
5. 避免汙染。
6. 所有洗腎液經過的地方，如洗腎機、導管及容器等，均應消毒。
7. 瓶蓋之封緘打開後請於廿四小時內用完。
8. 密封存放於室溫下。
9. 無醫師處方，不可使用

製造廠名稱：Medivators Inc.

製造廠地址：14605 28th Avenue North Minneapolis, Minnesota 55447, USA

藥商名稱：佳醫健康事業股份有限公司

藥商地址：新北市中和區中正路 880 號 17 樓