

# “台裕” 優潔 多功能保養液

YOU GEL Multi-Purpose Solution

衛署醫器製字第 000937 號

“台裕”「優潔多功能保養液」屬全效型軟性隱形眼鏡保養液，為無菌包裝，可解決你清潔、沖洗、殺菌、潤濕及保存隱形眼鏡的問題，只要一瓶即可完成全部工作，不刺激眼睛，不影響鏡片之本質，特別添加隱形眼鏡專用保濕劑 HPMC，具鎖水防乾的作用，會在鏡片上形成一層保護膜，讓水份保留在鏡片上不易流失，防止鏡片脫水、乾燥，讓配戴更舒適。

成分 : Each ml contains :

Sodium Chloride .....	9.0mg
Disodium Edetate .....	0.25mg
Poloxamer .....	2.5mg
Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) .....	5.0mg
Polyamimopropyl Biguanide.....	0.0005mg

作用 :

本品可清潔、沖洗軟性隱形眼鏡鏡片表面之附著污物，並有效殺死鏡片上有害微生物且安全不傷害眼睛，鏡片戴用前及戴用中使用本品可潤濕鏡片，一瓶即可完成保養鏡片之全部工作，不需額外使用生理食鹽水。

效能 :

軟性隱形眼鏡鏡片之清潔、沖洗、殺菌、保存、潤濕。

使用方法 :

1. 清潔、去蛋白和沖洗

滴三滴「優潔」到鏡片兩面，徹底搓揉鏡片至少 20 秒，再用足量「優潔」沖洗鏡片，以去除蛋白質、沉澱物、污物。

2. 殺菌、保存

將鏡片置於鏡片盒內，注入足量「優潔」，確定溶液已蓋過鏡片後，將鏡片盒蓋蓋好，讓鏡片浸泡至少 4 小時以完成殺菌、保存。

3. 潤濕

鏡片戴用前及戴用中使用本品可潤濕鏡片。

注意事項 :

1. 對其中任何一種成分過敏者禁止使用。
2. 使用後請栓緊瓶蓋，置於兒童不能及之處，室溫保存。
3. 請勿觸摸點滴口或將本液轉入其他容器，避免污染。
4. 已用過之溶液切勿重複使用。

貯藏方法 :

室溫避光貯存。

包裝 :

60、120、250、360、500ml 塑膠瓶裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司

新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號

TEL : (03)5826655 (代表號)