

“救保” 寶利法血液透析器
Gambro Polyflux Capillary Dialyzer
衛署醫器輸字第 006368 號

型號：17R/ 21R/ 24R

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。
衛生署規定透析器再生流程需依循 AAMI/ANSI Guideline 操作再生流程步驟及再生監控檢測，且
每一次操作均需記錄所有相關監測數據，並留存於病歷中。

一般資訊

為達到本品最佳使用效果及確保操作安全，使用前請詳讀本使用手冊。

本品已經滅菌並採無菌包裝，確保不含致熱原，運送過程無虞，可在灌注液體沖洗後立即使用。

只要依循本使用手冊操作時，其品質保證無虞。

建議保存溫度：攝氏 30 度以下。

CAUTION! 在重複使用的情況下，由於涉及各種重複使用的步驟、器材、儀器的條件，Gambro 公司無法保證重複使用的產品之無菌狀況、無致熱原情況及機械性完整性或產品性能。只有在醫生的監控之或得到醫師的核准之後才能進行列於本使用資訊之外的操作。

CAUTION! 用戶有責任確認沒有偏離任何推薦方法之外的操作或回收處理，如果有推薦方法以外的操作，用戶應予拒絕。

本手冊之名詞定義

WARNING! 係用以警告操作者勿採取特定會造成危險之動作，如疏忽時可能會導致受傷或死亡等不良反應。

CAUTION! 係用以提示操作者採取特定動作以避免可能發生之危險，如疏忽時可能對病人或儀器產生不良反應。

NOTE! 係用以提醒操作者，設備的正常功能，及處於特殊情況下應該採取之動作。

適應症

本血液透析器可用以進行慢性或急性之腎功能缺失疾病的血液透析治療。

本品可於同一病人，多次使用。

禁忌症

血液透析治療無絕對之禁忌症。當病人有出血或易於凝血的傾向時，治療過程中需由醫護人員監督下使用本品。如果發生影響病患病情穩定性的併發症時，應立刻停止治療。

重複使用的 polyflux R/LR 在已知病人對化學殺菌劑有過敏反應症時，應避免重複使用本品。

重複使用規則及對有肝炎或 HIV 感染的患者的透析器進行重複使用有關的事宜，請遵循當地醫療管理機構對重複使用血液透析器的規定。