

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	愛視潔去蛋白片	申請廠商	香港商眼力健亞洲有限公司台灣分公司
--------	---------	------	-------------------



- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
 - ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號（規格）、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
 - ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

愛視潔去蛋白片

Ultrazyme

衛署醫器輸字
第 017000 號

使用前請詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

用途：適用於所有軟式隱形眼鏡

產品說明：

愛視潔去蛋白片是一種專門給佩戴軟式隱形眼鏡使用者每週使用。

愛視潔去蛋白片是被用來和 Oxysept 1 Step 愛視潔雙氧保養系列產品互相搭配使用。

您對鏡片或是保養產品有任何疑問都應立即諮詢您的眼科醫師。

一週型愛視潔去蛋白片保養產品適用所有軟式隱形眼鏡，清除聚積沉澱在淚液中的蛋白質分子，如果蛋白質累積在鏡片上將會危害鏡片或減損鏡片使用壽命，每週固定使用愛視潔去蛋白片將可確保鏡片的舒適及延長鏡片壽命。

成份：Sodium Carbonate, Anhydrous; N-Acetyl Cysteine; Tartaric Acid; Polyethylene Glycol, 3350; Sorbitol FG Instant; Subtilisin-A Microgranulate

每週去蛋白和消毒殺菌的使用方法：在拿取隱形眼鏡鏡片之前徹底清潔雙手

清潔步驟：

1. 將鏡片盒打開取出鏡片，注入份量充足的愛視潔雙氧清潔消毒液至劃線部分即可。
2. 取出右鏡片，如果可以的話，請在鏡片的二面滴上數滴的清潔液，輕柔但仔細地用手指指腹搓洗 15 到 20 秒時間，以便清除鏡片上沉澱物，像是灰塵和化妝品，達到更棒的清潔效果。
3. 將右鏡片放置在註有“右”標記的右鏡籃內。
4. 取出左鏡片，重複上述的三項步驟，然後將其放置在標記“左”邊的鏡籃內。

消毒/中和/每週酵素清潔步驟

5. 放置一顆愛視潔顯示中和錠和愛視潔去蛋白片在含有愛視潔雙氧清潔消毒液的隱形眼鏡鏡盒內。
6. 將裝有鏡片的戴鏡籃放入鏡盒內，旋緊盒蓋並輕輕搖晃。
7. 讓鏡片浸泡最少六小時或放置一個晚上，如果使用不需放置愛視潔顯示中和錠之其他雙氧保養系統，則讓鏡片浸泡最少 15 分鐘或一個晚上。
8. 在將鏡片從鏡盒取出前，請上下搖動數次確保鏡盒內所有殘留的過氧化氫已經完全中和。
9. 用清潔專用生理食鹽水沖洗鏡片，然後戴上隱形眼鏡鏡片，將鏡盒內的愛視潔雙氧清潔消毒液倒掉用生理食鹽水沖洗鏡盒，切忌使用肥皂或去污劑，然後置於乾燥處晾乾。

重要注意事項：

1. 如果對成分過敏，請勿使用。
2. 請聽從眼科醫師或專業人員的建議指示來清潔保養鏡片。
3. 請選擇使用專為消毒/去蛋白的隱形眼鏡鏡盒。
4. 切勿直接佩戴從愛視潔雙氧清潔消毒液或去蛋白液中取出的鏡片。
5. 切勿將上述的藥水直接使用於眼部。

7. 6.



6. 在配戴隱形眼鏡之前，切記一定要先將鏡片中和消毒。
7. 若將愛視潔去蛋白片搭配其它廠牌的雙氧清潔消毒液，則鏡片浸泡時間絕不可少於該廠牌藥水所建議之最短時間。
8. 如果產品使用中的有任何不適，請立即暫停使用並請諮詢眼科醫師及專業人員。
9. 請勿觸碰到雙氧清潔消毒液滴管頭部位，因為這很可能造成雙氧清潔消毒液受到污染。
10. 請勿使用過期雙氧清潔消毒液，並且用完即應丟棄或倒掉(勿重覆使用)。
11. 請置於乾燥涼爽處。
12. 請讓孩童遠離所有產品。
13. 切忌使用唾液潤濕鏡片，也請勿用自來水沖洗鏡片或溶解愛視潔去蛋白片。
14. 勿口服愛視潔去蛋白片。
15. 切忌將鏡片浸泡於去蛋白液中超過長達 16 個小時，如果鏡片被擱置過長時間，請在配戴之前進行鏡片消毒和中和的工作。
16. 如去蛋白片呈現軟化、受潮和不正常外觀，請勿使用。

規格：10 錠/盒


製造廠：Manufactured by Piramal Enterprises Limited (地址：Plot 67-70, Sector II, Pithampur 454 775, Madhya Pradesh, India) for Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. (地址：1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705, USA)

藥商名稱：香港商眼力健亞洲有限公司台灣分公司

藥商地址：「依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載」

藥商電話：(02)2505 0828



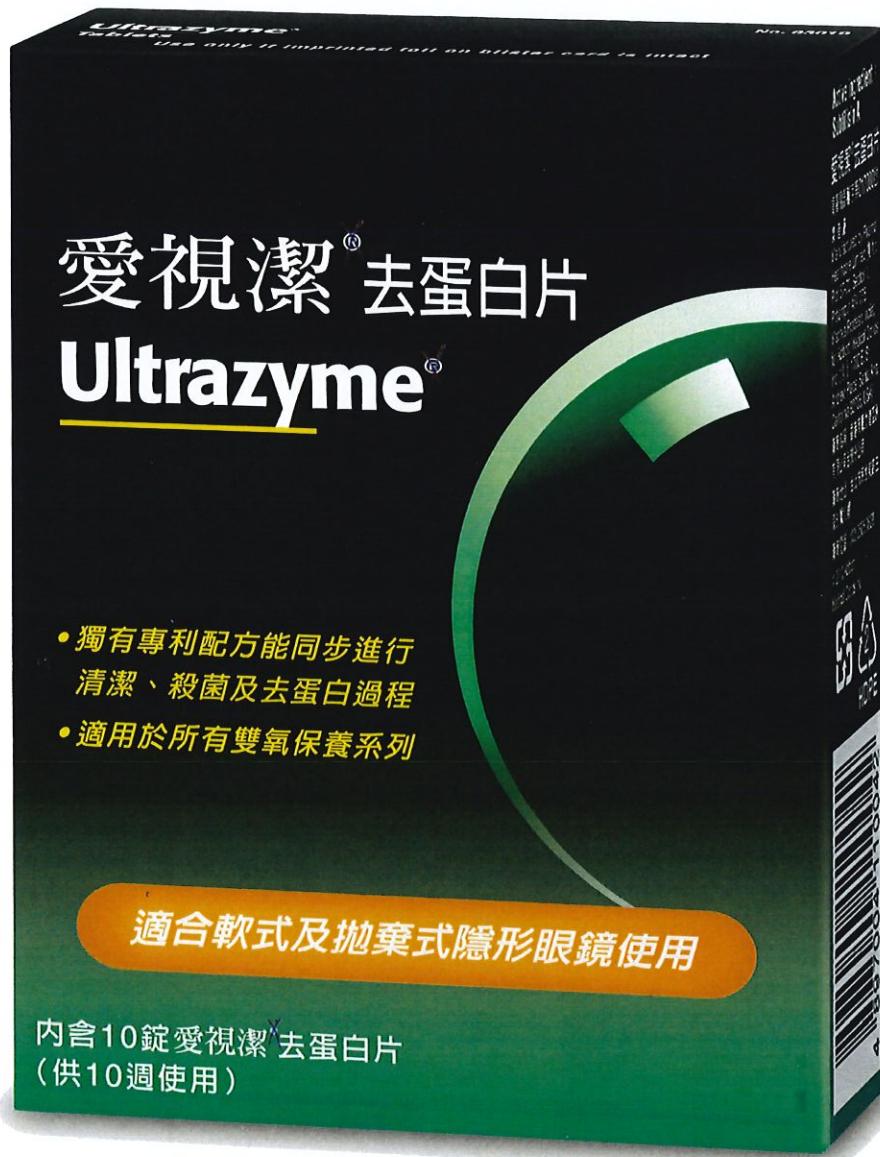

www.ultrazyme.com