



“濟生”血液透析濃縮液 BSR-01

Hemodialysis Conc. BSR-01 "Chi Sheng" 3.8L

簡介：“濟生”血液透析濃縮液BSR-01為無熱原、無色至淡琥珀色的鹽類濃縮液。

組成：每毫升含有下列成分及含量：

Composition	Per mL Concentration
Sodium Bicarbonate	84.0 mg

賦形劑：Purified water

適應症：配合洗腎機及人工腎臟，清洗患者血中尿毒。

用法用量：

1.本液(B液)使用時必須配合“濟生”血液透析濃縮液(35X)之A液及純水使用。

2.透析時請遵照洗腎機操作說明、操作方法進行透析。

3.透析液稀釋比例為A液：B液：純水=1：1.225：32.775。

稀釋後電解質濃度：

電解質濃度(mEq/L)	
Na ⁺	HCO ₃ ⁻
35.0	35.0

禁忌症：高血鉀症(僅針對立即使用的透析液鉀濃度4mmol/L或更高的血液濃縮液而言)；低血鉀症(僅針對立即使用的透析液鉀濃度3mmol/L或更低的血液濃縮液而言)。當對病人處方透析液的鉀濃度時，應考慮血漿鉀濃度快速改變所致的潛在副作用；難以控制的凝血異常患者。

副作用：血液透析中曾觀察有低血壓，噁心，嘔吐，肌肉痙攣，暈眩，頭痛及昏迷之情形。

注意事項：

1.本藥限由醫師使用。

2.本藥為無熱原產品。

3.透析液稀釋前、後，若有沉澱發生，切勿使用。

4.貯存條件：密封存放於40°C以下貯存環境，不可冷凍。

5.本品不得使用於注射或供腹膜灌洗之用。

6.須保持密封，包裝破損則勿使用。

7.洗腎前請參考洗腎機操作手冊說明。

8.開封及稀釋後須立即使用。

9.稀釋用水請用純水或R.O.水。

Lot. No:
Mfg. Date:
Exp. Date:

衛部藥製字第 060494 號

藥商及製造廠：濟生醫藥生技股份有限公司 地址：新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號

CHI SHENG PHARMA & BIOTECH CO., LTD TEL:(03)598-3811(代表號)

包裝：3.8公升HDPE塑膠桶裝