

“富士”數位 X 光攝影系統 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 022053 號

醫材名稱：“FUJIFILM” Digital Radiography D-EVO System

製造商：

FUJIFILM TECHNO PRODUCTS CO., LTD. TOUHOKU FACTORY HANAMAKI
SITE

受影響型號：DR-ID300CL

警訊摘譯：

日本原廠通知，符合下列條件且由原廠所銷售的電腦將作召回動作：

PC: Dell OptiPlex 780

OS: Win 7

CL AP: DR-ID 300CL v5.0 或以後的版本

以上動作是因為在DELL OptiPlex 780/790/990上安裝DR-ID 300CL在操作後放置一段時間後會有出現當機的現象。若是當機當下是在讀取影像中，有可能會造成影像遺失。此案例目前只有在日本發生過一次。

造成此問題的原因是因為，OS內的Volume Shadow Service Copy功能遭到設定與啟動而導致。

國內情形：

滴開股份有限公司有引進 DR-ID300CL，稱為 CONSOL Advance 軟體。目前所使用的電腦都是向 DELL 台灣所採購，並未由日本進口，故上述召回將不適用台灣。有鑒於此問題造成的影響甚大，技術中心針對此部分已通告全區，並對現行三家客戶進行 OS 內的 Volume Shadow Service Copy 功能停止的動作。

資料來源：

日本 PMDA

<http://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-5161>