

# 呼吸器

## “哈明頓”呼吸系統

### 安全警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 007179 號、第 024402 號

產品英文名稱：

MICROPROCESSOR CONTROLLED ICU VENTILATOR "HAMILTON"  
“Hamilton” Patient Respiratory System

受影響規格/型號/批號：Serial Numbers: 7198, 7216

警訊說明：

調查發現 Hamilton G5 /S1 呼吸器在操作者執行抽痰治療模式後，其通氣及警告功能會被無預警地關閉。此狀況的發生不分病人群組(新生兒、孩童及成人)無關。

Hamilton G5/S1 呼吸器的缺失會在以下特定狀況下發生，抽痰開始時操作者按壓呼吸器的 O<sub>2</sub> 加強功能鍵，**可能於 50 毫秒內偵測到管路脫落，並顯示於介面視窗上**。此一缺失會導致機械通氣中斷，以及除了中度警示“Loss of PEEP”（當 PEEP 設定值大於 4mbar）外其餘警告功能的關閉。此時請注意呼吸器的環境安全閥及吐氣閥為開啟狀態，**以便**自發性呼吸的病人可呼吸室內空氣而不需仰賴呼吸器。

透過製造商提供的軟體碼（software key）永久性解除 Hamilton G5/S1 呼吸器的自動抽痰模式。此項矯正措施將於 2014 年 6~7 月之間的例行性維護時執行。

國內矯正措施：

經查，國內並無進口受影響批號之機器。

廠商聯繫資訊：嘉杏股份有限公司

附件(提供下載)：(無)

相關警訊連結(網址)：

澳洲 TGA

<http://www.tga.gov.au/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2014-RN-00557-1>