

“醫科特”醫用帶電粒子放射治療諮詢系統軟體

安全警訊

許可證號：衛署醫器輸字第 024269 號

產品英文名稱：“IMPAC” MOSAIQ Oncology Information System

受影響規格/型號/批號：153267, 152933

警訊說明：

當使用治療床移動助手(CMA)時，若用戶將滑鼠游標停留在”方向”下拉選單上，然後使用了滑鼠滾輪或觸控板滾動條，”方向”選單可能會更改，而用戶原本只是要將滑鼠游標移至螢幕的其它區域。

相同的，若用戶將滑鼠游標停留在”部位”下拉選單上，然後使用滑鼠滾輪或觸控板滾動條，”部位”可能會更改，且因”部位”的更改相對的改變了”方向”和”位移”。

如果選擇了”方向”或”部位”下拉選單，而滑鼠箭頭移動到任何對話框時使用到了滑鼠滾輪或觸控板滾動條，也可能會造成無意的改變。

國內矯正措施：

目前瞭解受影響醫院並無使用到 MOSAIQ CMA 功能進行病患治療擺位修正，如需擺位修正，則是由另一套 LINAC XVI (X-ray volume imaging) 設備控制，故未發生病患因此影響治療；已對國內受影響醫院完成告知措施。

廠商聯繫資訊：久和醫療儀器股份有限公司

附件：(無)

相關警訊連結：

澳洲 TGA

<http://www.tga.gov.au/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2014-RN-00560-1>