

"奇異" 運動心電圖跑步機

安全警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 012848 號

產品英文名稱："GE" Exercise Equipment

受影響規格/型號/批號：Series T2100 Treadmill

發布對象：醫療從業人員

警訊說明：

GE Healthcare 注意到 T2100 跑步機的履帶在使用過程中，可能會發生非預期的滑動，進而影響設備之性能。此履帶之非預期滑動可能發生順序是：履帶滾動速度無預警地變慢，然後突然向前或向後加速。當此情況發生時，按下緊急停止按鈕 (ESTOP) 並不會使跑步機履帶立即停止；相反的，履帶滾動會依慣性減速，35 秒內才能完全停止。突然地改變跑步機履帶的速度及/或方向可能會導致病人摔倒並受傷。

國內矯正措施：

經查此產品安全通知所提及的問題，目前國內無此不良事件發生與回報。台灣奇異亞洲醫療設備股份有限公司為避免此一問題發生，已通知受影響的客戶進行軟體更新(共 96 台)，GE 工廠將在 2015 年 6 月中旬寄出軟體，預計於同年 9 月底前完成更新作業。

廠商聯絡資訊：

奇異亞洲醫療設備股份有限公司

聯絡電話：0800-437-1171

聯絡人電子郵件：meihua.kuo@ge.com

附件(提供下載)：警訊摘譯

相關警訊連結(網址)：MHRA

<https://mhra.filecamp.com/public/file/28kz-jc32ecn1>