## "柯惠" 肯特利柯登斯去顫器電極貼片

## 安全警訊

許可證字號: 衛署醫器輸字第 017999 號

產品英文名稱: "Covidien" Kendall Medi-Trace Cadence Electrodes

受影響規格/型號/批號: 22660R

發布對象:一般民眾、健康照護專業人員、醫療機構

## 警訊說明

原廠接獲通報,特定型號肯特利柯登斯去顫器電極貼片無法搭配特定機型電擊器 (飛利浦 FR3 及 FRx 電擊器)。若搭配 FR3 電擊器,會出現無法使用的狀況,造成急救延誤。搭配 FRx 電擊器,必須在使用前先連接電擊貼片,若沒有先接上正確的電極貼片則會持續發出警示音。

## 國內矯正措施

- 1. 經查,此型號電極貼片已於2013年中停產。將清查產品存貨並通知客戶進行 矯正。
- 2. 若有存貨,將提供客戶產品使用注意事項說明或在受影響產品包裝上貼上原 廠所提供的標示,清楚標明電極貼片無法搭配特定型號電擊器。
- 3. 台灣柯會自即日起配合總部進行自發性的矯正措施,若有任何疑問,請與我們聯絡。

廠商聯絡資訊:台灣柯惠股份有限公司

聯絡電話:(02)2656-6717

附件(提供下載) : 警訊摘譯

相關警訊連結(網址):

Health Canada

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/41547r-eng.ph