

# “德爾格”急救型呼吸器及附件

## 安全警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 023210 號

產品英文名稱：“Dräger” Emergency Ventilator and accessories

受影響規格/型號/批號：OXYLOG 2000 PLUS、OXYLOG 3000、OXYLOG 3000 PLUS

發布對象：一般民眾/醫療從業人員/醫療器材專業人員

### 警訊說明：

在某些產生錯誤訊息的案例中，設備會發出聲光式警報，呼吸系統會洩壓，且通氣功能會有停止工作的情況。該錯誤訊息是由控制器（設定電位計）的接觸電阻增加所引起的。增加的電阻是因為控制器在一段長時間所形成的氧化物層所引起的。

如果控制器是很少或從不旋動，氧化層就會形成。根據產品的監測，一些用戶從來沒有、或很少使用氧濃度控制器。作為一種預防性的措施，以確保控制器的電阻錐尖是足夠乾淨的，德爾格(Draeger)建議以下對設備的日常檢查：

- 在開啟 Oxylog 之前並準備進行設備的日常檢查時，工作人員要記得旋轉各個控制器（VT、RR、Pmax 和 FiO<sub>2</sub>）至左、右的停止位置（即旋轉至最大值和最小值位置）至少十次。

- 然後打開 Oxylog 和完成設備內建的檢查功能。

### 國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型/批號數量共 47 台，台灣德爾格醫療器材有限公司已於 104 年 12 月 31 日發出安全說明信給個別使用單位。

廠商聯絡資訊：台灣德爾格醫療器材有限公司

相關警訊連結(網址)：TGA

<http://www.tga.gov.au/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2015-RN-01256-1>