

具安全帶的支撐椅、輪椅、升降機及衛浴設備

安全警訊

發布對象：

所有參與具安全帶的支撐椅、輪椅、升降機及衛浴設備的供應、處方、操作、維護及照護人員。

產品：

所有具安全帶的支撐椅、輪椅、升降機及衛浴設備

警訊摘要：

MHRA 持續接收因未使用、未安裝、調整不當或未正確維護上述相關產品設備之固定/安全帶而受傷及死亡的通報。

問題危害包含患者從設備滑落或位移造成窒息或勒斃，或滑出造成受傷。

對於某些無法僅以帶子固定於適當坐姿的患者，可能需要其他支撐，以防止他們滑落（如可傾倒型或支撐型座椅）。

建議行動：

- 依照製造商的指示安裝、調整、使用、清洗、檢查和維護具有固定/安全帶的支撐椅、輪椅、升降機及衛浴設備。
- 初次使用前，應知悉製造商的使用說明，並已接受關於如何檢查、調整、清潔及維護各項設備的訓練。
- 每次使用前，應確保固定/安全帶處於良好狀態、適合使用者使用並有正確調整。
- 確認每項個人需求之審查，包含固定/安全帶是否適合使用者及護理人員使用。
- 注意有些無法僅以帶子固定於適當坐姿的之患者，可能需要其他支撐，以防止他們滑落（如可傾倒型或支撐型座椅）。
- 通報主管機關及製造商與使用此類設備相關的所有不良事件。

相關警訊連結(網址)：

<https://www.gov.uk/drug-device-alerts/all-posture-or-safety-belts-fitted-to-supportive-seating-wheelchairs-hoists-and-bathroom-equipment-risk-of-serious-injury-or-death>