

## “奇異”單光子放射/電腦斷層系統 安全警訊

許可證字號：	衛署醫器輸第 022050 號
醫材名稱：	“GE” SPECT/CT SYSTEM
製造商：	GE MEDICAL SYSTEMS ISRAEL, FUNCTIONAL IMAGING
國內受影響型號：	Discovery NM/CT 670

### 警訊摘譯：

依“奇異”單光子放射/電腦斷層系統使用步驟 protocol 在 45 角度的情況時，若病人的手臂置於頭部上方且未使用專用的安全臂章，則檢測器可能會接觸病人肘部。

奇異公司建議使用者－確保病人的身體不要伸出檢查床，若病人有需要將手臂放置於頭部的需求，請使用專用的安全臂章。針對此問題，2014 年 2 月將會提供軟體更新。

### 國內情形：

經查，國內受影響產品共 2 台，奇異亞洲醫療設備股份有限公司目前正進行矯正行動。軟體升級目前預計 102 年 12 月底至 103 年 1 月中施作完畢。

資料來源：

澳洲 TGA

<http://www.tga.gov.au/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2013-RN-01062-1>