

百快 家用新冠病毒抗原快篩檢測組使用說明書

防疫專案核准輸入第1106811670號

型號: G69RHSD1

本說明書適用於BIOCREDIT COVID -19 Ag Home Test Nasal在使用此測試之前，請詳細閱讀使用說明。

核准之使用範圍與用途：

本產品為家用型檢驗試劑，利用側向流動原理，定性檢測疑似感染COVID-19患者自行採集之人類鼻腔檢體中存在的 SARS-CoV-2 核殼蛋白抗原。陽性結果並不能排除細菌感染或與其他病毒共同感染；陰性結果不能排除SARS-CoV-2感染。本檢測僅提供初步篩檢結果，不應單以本產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。

注意：

1. 本產品僅供體外檢測使用，不應單憑檢測結果作為感染與否的依據，須配合專業醫師諮詢來做判定。檢測結果仍須經由專業醫師診斷作為最終判定。
2. 檢測結果如為陽性，請立即前往鄰近的社區採檢院所檢測，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。
3. 本產品僅評估19歲以上人員自行採檢結果，建議應由19歲以上人員使用。


BIOCREDIT
COVID-19 Ag Home Test Nasal Rapigen



詳細操作影片

一、產品內容物

固定盤 (請確認編號位置)

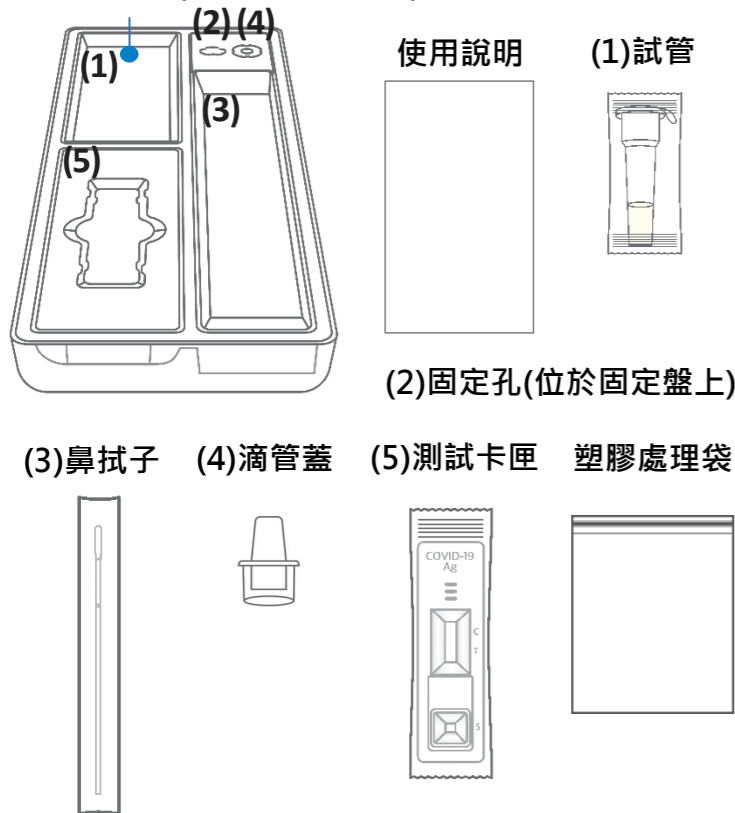

二、操作說明



1 測試前準備




2 準備試管




3 鼻腔採樣

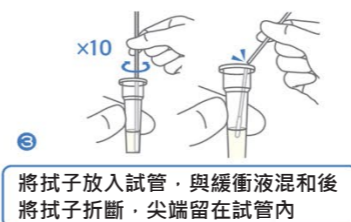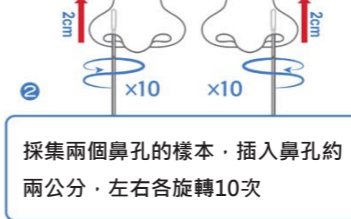

4 組合滴管蓋

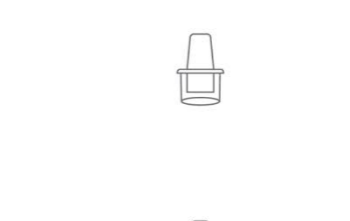

5 測試

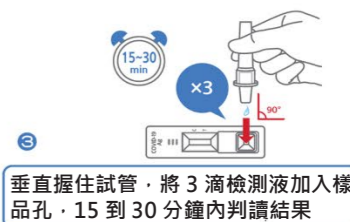

三、檢驗結果判讀

結果判讀	結果顯示	說明
Negative 陰性反應		在結果顯示窗中僅控制線(C)呈現一條紅線。陰性結果意味著未在您的樣本中找到COVID-19的病毒。但是，如果您的身體有出現COVID-19症狀，請撥打1922或連繫當地衛生局，依指示盡速就醫。
Positive 陽性反應		在結果顯示窗中呈現兩條線；測試線(T)呈現一條黑線，而控制線(C)呈現一條紅線。如觀測到控制線(C)和測試線(T)，就表示您很可能感染COVID-19，請立即前往鄰近的社區採檢院所檢測，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。
		*測試線(T)即使僅出現微弱訊號仍應視為陽性反應。
Invalid 無效反應		在結果顯示窗中控制線(C)未呈現一條紅線。可能是因測試程序不正確而導致，建議請重新進行檢測。

四、丟棄測試盒

1. 測試完成後，請將檢體及檢測裝置放在塑膠處理袋中。
2. 根據疫情指揮中心發布準則處理。

