


“白可立”家用新冠病毒抗原快速檢測試劑

防疫專案核准輸入第 1106812376 號

使用範圍與用途：本產品為家用型檢驗試劑，利用側向流動原理，定性檢測疑似感染 COVID-19 患者自行採集之人類鼻腔檢體中存在的 SARS-CoV-2 核殼蛋白抗原。陽性結果並不能排除細菌感或與其他病毒共同感染；陰性結果不能排除 SARS-CoV-2 感染。本檢測僅提供初步篩檢結果。不應單以本產品檢驗結果做為病患管理之唯一依據。

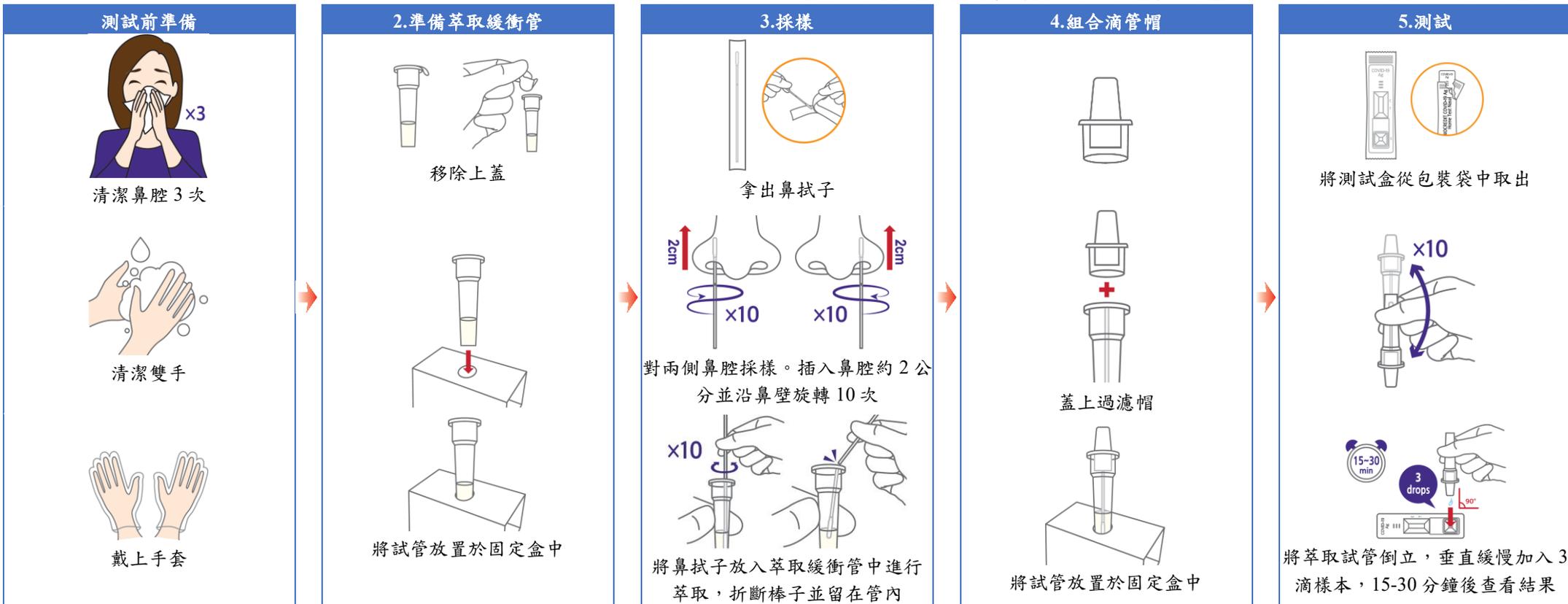

結果判讀

判讀結果	圖示	說明
陰性		僅出現紅色對照線Ⓒ。僅出現一條紅色對照線Ⓒ。表示未在您的樣本中找到 COVID-19 的病毒。但若出現 COVID-19 症狀，請撥打 1922 或連繫當地衛生局，依指示盡速就醫。
陽性		出現紅色對照線Ⓒ及黑色測試線Ⓓ。出現一條紅色對照線Ⓒ及一條黑色測試線Ⓓ。表示您可能感染 COVID-19，請立即前往鄰近的社區採檢院所檢測，並依據中央疫情指揮中規定執行相關防疫措施。 *即使測試組線Ⓓ是微弱的，也應判讀為陽性結果。
無效		沒有出現紅色對照線Ⓒ，或只有出現黑色測試線Ⓓ。沒有出現紅色對照組線Ⓒ，或只有出現測試組線Ⓓ，建議將此樣本重新進行檢測。表示可能操作過程有錯誤或產品出現問題，導致結果無效，請立即檢查關於試劑盒的使用方法是否有誤，若有問題請務必聯繫購買處。

處置

- 1.若檢測結果為陰性，請將檢體及檢測裝置妥善放在隨附的垃圾袋中密封，並將所有測試包材料丟棄在垃圾桶內。
- 2.若檢測結果為陽性，須前往鄰近的社區採檢院所進行第二次檢測，並將本次自行檢測的檢體及檢測裝置妥善密封，交付篩檢站進行醫療廢棄物處理。

注意事項：

- 1.本產品僅供體外檢測使用，不應單憑檢測結果作為感染與否的依據，須配合專業醫師諮詢來做判定。專業醫師的診斷將對本檢測結果做最終判定。
- 2.檢測結果如為陽性，請立即前往鄰近的社區採檢院所檢測，並依據中央疫情指揮中心執行相關防疫措施。
- 3.本產品僅評估 19 歲以上人員自行採檢結果，建議應由 19 歲以上人員使用。

製造業者名稱：RapiGEN, Inc.

製造業者地址：3-4F, 16, LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu Anyang-si, Gyeonggi-do 14119 REPUBLIC OF KOREA

醫療器材商名稱：崧閔有限公司

醫療器材商地址：臺北市中山區建國北路二段 87 號 5 樓之 1

掃描二維條碼獲取操作影片說明

