


懸吊式移動設備之使用與保養注意事項

安全警訊

(通類產品)

警訊摘要：

食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)接獲醫事機構通報，手術房內的懸臂式手術燈燈頭連同懸臂無預警掉落，經調查發現手術燈因固定組件於安裝時未正確就位，導致懸臂直桿長期傾斜不平衡，而壓迫內部 C 型扣環(circlip)，造成燈頭掉落。

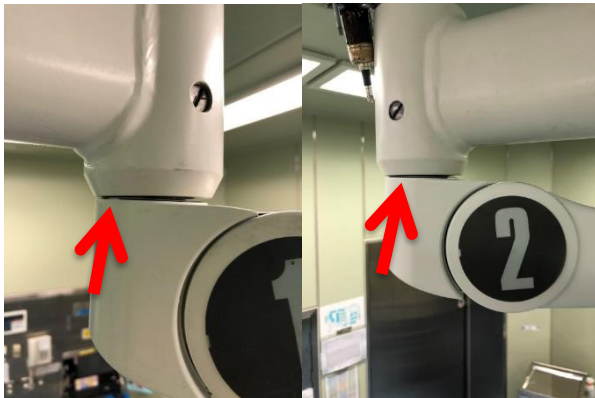

燈頭懸臂歪斜、不密合



C 型扣環脫落與位移

食藥署提醒相關醫事機構及醫護人員，在例行性操作與保養此類懸吊式移動設備時，須注意若出現傾斜、移動不順暢及滑動情形，請立即進行維修檢查或與原廠接洽。

給醫護人員的建議：

使用相關懸吊式移動設備時，應避免大力拉扯，且隨時注意設備是否出現傾斜、移動不順暢及滑動情形，若有異常情形，可能已出現內部基座水平、軸承或剎車等問題，請立即報修，以維護使用者及病人安全。

給醫事機構的建議：

1. 懸吊式移動設備於安裝前，請務必與設備廠商確認懸吊基座的適用性及安裝規格，並留下紀錄，以確保日後運作正常。
2. 使用懸吊式移動設備前，請注意正確使用方式及應注意事項；日常例行性清潔保養與檢查時，須隨時注意設備是否出現傾斜、移動不順暢及滑動情形。
3. 懸吊式移動設備內部有許多軸承等機械零件，建議機構建立並落實完善的一二三級保養機制：
 - 一級保養：使用單位的日常清潔、外觀及移動順暢度檢查(頻率：至少每月)
 - 二級保養：醫工單位的巡檢保養，進行一般功能性檢測，除列入一級保養內容外，並加入天花板基座水平度及固定零件等檢查(頻率：至少每季)
 - 三級保養：廠商或醫工單位實施保養，依據原廠手冊規定施作(頻率：至少每年。若原廠無規劃，則由醫事機構自行規畫，除列入一、二級保養項目外，並加列關節軸承及接觸面檢查)

相關警訊來源：

全國藥物不良反應通報中心