

# GenBody COVID-19 Ag Home Test

SARS-CoV-2 Antigen Self-test

基因巴帝居家用新冠病毒抗原快篩檢測套組  
防疫專案核准輸入第1106036358號

❗ 如果無法準確地按照使用說明進行測試，請在專業人員協助下按照使用說明進行準確的測試。

型號:COVAGHT2-1

**使用範圍及用途**  
本產品為家用型檢驗試劑，利用側向流動原理，定性檢測無論有無症狀或是有其他流行病學原因，疑似感染COVID-19的18歲以上患者之鼻腔拭子檢體是否具有SARS-CoV-2核殼蛋白抗原。陽性結果並不能排除細菌感染或與其他病毒共同感染；陰性結果不能排除SARS-CoV-2感染。本檢測僅提供初步篩檢結果。不應單以本產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。

操作說明影片



## 01 測試前


測試前請用肥皂或洗手液洗手，並徹底擦乾。




## 02 準備

測試前請先檢查組件。

❗ 所有的組件都必須在平坦且乾淨的地方進行測試。

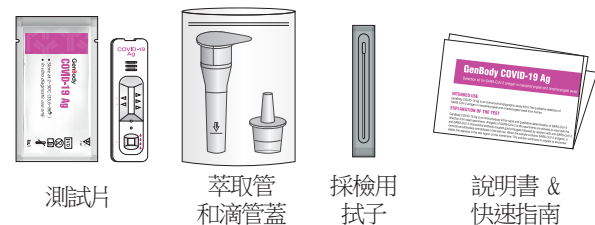

檢查測試片包裝後面的有效日期和乾燥劑的顏色。如果已經過期，請勿使用。

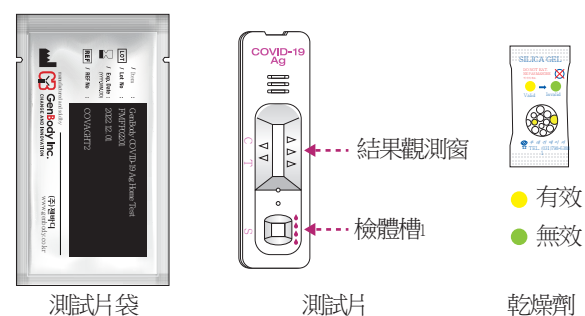


注意:

1. 本產品僅供體外檢測使用，不應單憑檢測結果作為感染與否的依據，須配合專業醫師諮詢來做判定。檢測結果仍須經由專業醫師診斷作為最終判定。
2. 檢測結果如為陽性，請立即前往鄰近的社區採檢院所檢測，並依據中央疫情指揮中心執行相關防疫措施。
3. 本產品僅評估18歲以上人員自行採檢結果，建議應由18歲以上人員使用。

## 03 採檢


取下萃取管的蓋子，並將其放置於包裝盒上的萃取管盒孔中。

- ❗ 請勿食用萃取管內溶液或接觸到皮膚或眼睛。
- ❗ 若沒有將萃取管插入包裝盒的孔洞裡，萃取管可能會傾倒。

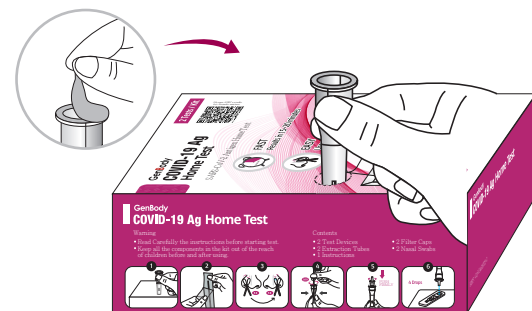


撕開包裝取出用於採檢的拭子。

❗ 注意：取下時請小心不要碰到拭子頭端。

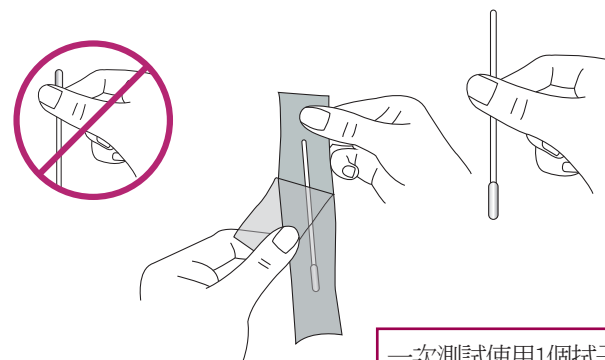

將拭子頭部放入鼻內約1.5公分深位置，緩慢滑動擦拭內壁5次共15秒。在另一個鼻孔重複相同步驟。

❗ 請注意不要把拭子放得太深。確保在鼻子兩側收集檢體。

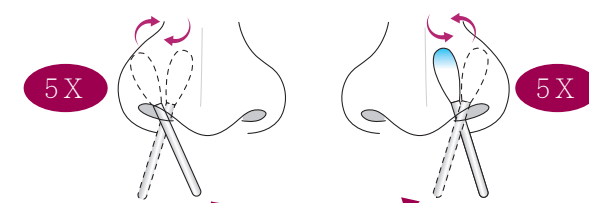


❗ 兩個鼻孔應由同一拭子採檢，以確保檢測的準確性。

❗ 如果不容易採檢，請用鏡子採集檢體。

## 04 測試過程


準備好萃取管，將拭子放入管內，擠壓管子兩側並旋轉拭子至少10次。然後擠壓拭子並從萃取管中移除拭子。蓋上滴管蓋，並插入包裝盒孔洞。

❗ 請勿食用萃取管內的溶液，避免萃取液與皮膚和眼睛接觸。

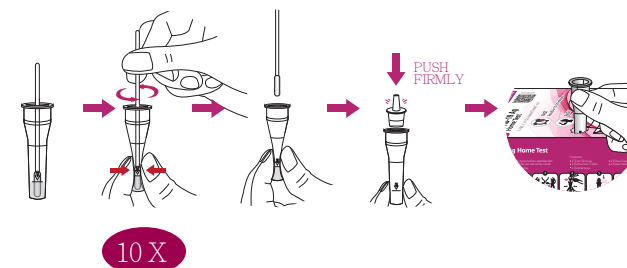


從袋中取出測試片並放置在平坦的表面上。確認包裝內乾燥劑顏色。

❗ 不要觸摸測試片的結果觀測窗及檢體槽。

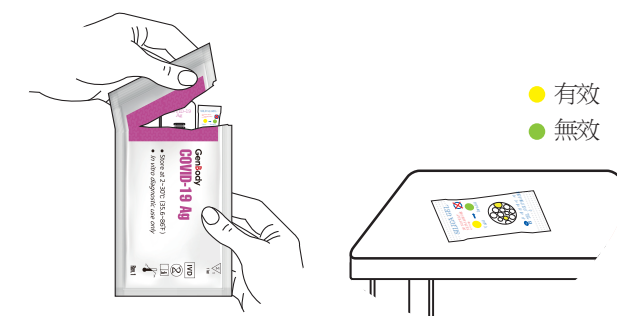

將帶有封閉滴管蓋的萃取管垂直倒置，並在測試片的檢體槽小心擠入4滴溶液。

❗ 請勿將所有溶液從萃取管擠出。

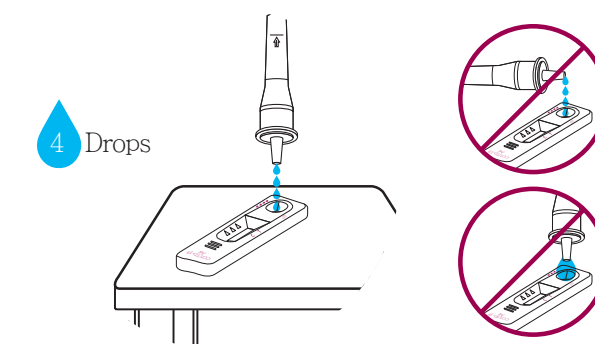


請等待15分鐘並讀取結果。請勿超過20分鐘再讀取。



## 05 讀取結果


只有在控制線處 (C) 有一條線

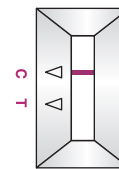

陰性


只有控制線處(C)有一條線。這表示在測試檢體內沒有偵測到COVID-19抗原。若出現COVID-19症狀，請撥打1922或連繫當地衛生局，依指示盡速就醫。

在控制線處 (C) 和測試線處 (T) 各有一條線

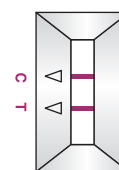


陽性

在控制線處(C)和檢測線處(T)各有一條線。測試線處(T)有任何微弱的紅紫線，都應被視為陽性。

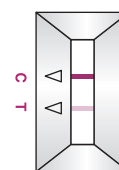

這表示檢體內有偵測到SARS-CoV-2抗原，可能被SARS-CoV-2感染。請立即前往鄰近的社區採檢院所檢測，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。


控制線處 (C) 沒有出現線

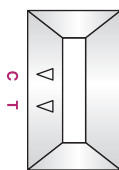

無效

如果控制線(C)沒有出現，這表示無效的結果。請用新的測試片和新的拭子再次檢測，若仍為無效結果，請聯繫購買處。

## 06 處置

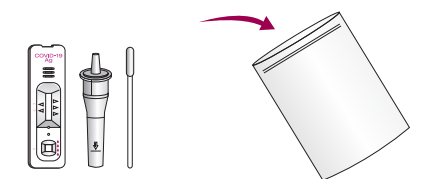

1. 若檢測結果為陰性，請將檢體及檢測裝置妥善放在隨附的萃取溶液袋中密封，並將所有測試包材料丟棄在垃圾桶內。
2. 若檢測結果為陽性，須前往鄰近的社區採檢院所進行第二次檢測，並將本次自行檢測的檢體及檢測裝置妥善密封，交付篩檢站進行醫療廢棄物處理。

製造業者名稱: GenBody Inc.

製造業者地址: 3-18, Eopseong 2-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 31077, Republic of Korea

醫療器材商名稱: 森昌有限公司

醫療器材商地址: 台北市松山區復興北路369號8樓