

## INDICAID 妥析新冠病毒快速抗原家用檢測試劑盒

REF P0038, P0039, P0040, P0041



適合2歲以上人士使用

使用者必須年滿14歲方能在無人監督的情況下使用測試套裝

### 進行測試



#### 預備你的用具

- 檢查產品包裝盒上的有效日期。
- 取出1支採樣棒、1支測試片和1個測試溶液小瓶。
- 請準備一個可計算20分鐘的計時器。(試劑盒內並沒有提供)



#### 將樣本放進測試溶液小瓶

- 請立即將採樣棒放入測試溶液小瓶中。**傾斜瓶子以確保採樣棒頂端(軟端)完全浸泡在溶液中。**
- 將採樣棒在測試溶液中來回轉動20次。
- 在取出前，將採樣棒頂端壓向瓶子的內壁並轉動，以除去過多的溶液。

**採樣後請立即測試樣本。須於採樣後5分鐘內放入提取測試溶液、或在放入提取測試溶液後最多2小時內測試樣本 (存放於室溫下)。**



#### 在進行測試前和測試後，請徹底洗手最少20秒




#### 扭上瓶蓋，並露出滴頭

- 扭緊瓶蓋。
- 扭開小瓶蓋子的紫色部分，露出滴頭。
- 手指避免觸摸到滴頭。



#### 扭開測試溶液小瓶的整個瓶蓋


- 將測試溶液小瓶的整個瓶蓋(紫色和白色部份)扭開。
- 將承載測試溶液小瓶和蓋子放在平坦的表面上。

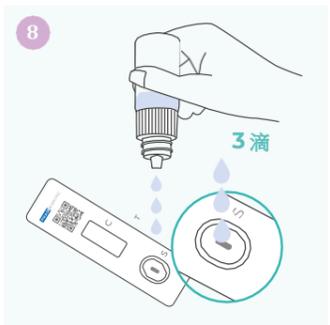

#### 將測試溶液滴到測試片上

- 打開盛載測試片的包裝，將測試棒放在平坦的表面上。
- 在測試片上找出橢圓形開口(S處)。
- 慢慢擠出**3滴**溶液到橢圓形開口。
- 滴出少於3滴溶液於橢圓形開口可能會出現假陰性結果。

**請勿在20分鐘內或多於25分鐘讀取結果，否則測試會出現不準確的結果。**

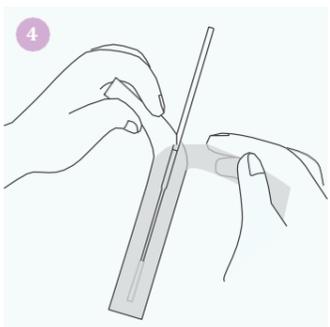

#### 打開包裝取出採樣棒


- 為保持採樣棒潔淨，請避免讓採樣棒接觸任何表面，並在進行測試前，方從包裝中取出採樣棒。



#### 將測試片至於靜止狀態20分鐘，並讀取測試結果


- 啟動計時器，並倒數20分鐘。
- 將測試片放在桌上或平面上，直至計時器響起。
- 20分鐘後，立即檢視你的測試結果。

**請勿在20分鐘內或多於25分鐘讀取結果，否則測試會出現不準確的結果。**

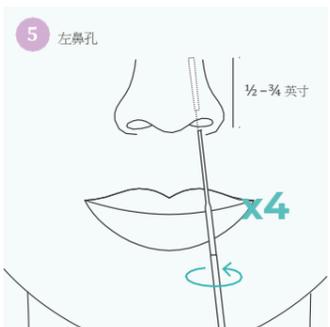

#### 使用同一的採樣棒從兩側鼻孔採集鼻拭子樣本

- 將採樣棒伸進一側鼻孔**(不超過1.3至1.9公分)**；不需過度深入。(請參閱圖示)。
- 採樣棒緊貼鼻孔內壁，輕力按壓並慢慢旋轉**最少4個圈**，以採集鼻腔上所有分泌物，這個過程需時約15秒。
- 使用**同一的採樣棒**在另一側鼻孔重複同樣的步驟。
- 為兒童採集樣本時，伸進鼻孔的最大深度應少於1.9公分。同時，你亦可能需要在伸入採樣棒採樣時，由另一人穩定兒童的頭部。

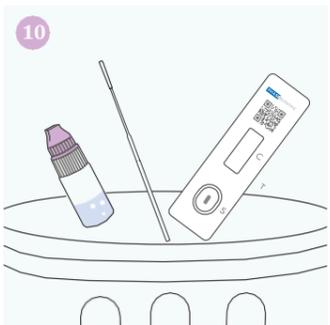

#### 妥善棄置用過的測試套裝

測試完成後，如檢驗結果為陽性，請將檢體及檢測裝置妥善密封。請配合中央流行疫情指揮中心規定執行相關的防疫措施。測試完成後，如檢驗結果為陰性，請將檢體及檢測裝置放在塑膠處理袋中，並將所有測試材料丟棄在垃圾桶內。

製造業者名稱：PHASE Scientific International Ltd.  
製造業者地址：32 & 33F, Gravity, 29 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong  
醫療器材商名稱：永芯生技股份有限公司  
醫療器材商地址：臺南市麻豆區巷口里和平路2之10號1樓

**於鼻孔採集拭子樣本對能否得到準確的結果十分重要。若你的檢體不是從鼻孔採樣，測試將產生假陰性結果。**


### 結果解讀

- 應結合個人最近的接觸史、病史以及是否存在與COVID-19一致的臨床徵象和病徵來分析結果。
- 請在光線充足的地方檢視你的測試結果。
- 尋找測試棒上(C)(對照)和(T)(測試)區域旁邊的顯示線。請使用下表解讀所看到的結果。
- 請將你的測試結果報告呈交予你的醫療服務提供者，以獲得適當的醫療護理。
- 若你有出現COVID-19的感染徵狀，可進行單次測試。
- 若你沒有出現COVID-19的感染徵狀，你將需要進行至少2次的測試。

#### 陽性測試結果

控制線(C)和測試線(T)均出現，這表示檢測到了SARS-CoV-2抗原。

**注意：測試線(T)中的任何微弱線條都應視為陽性。陽性檢測結果表示檢測到來自COVID-19的抗原，您目前很可能患有COVID-19疾病。依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。**

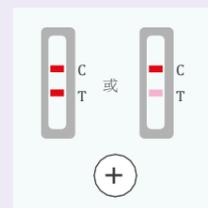

如同時看到對照線(C)和測試線(T)，則測試結果為陽性。任何帶有對照線(C)和微弱可見的紅色測試線(T)，均應被視為陽性。


**請細心留意！“T”區域的顏色深淺度可能會有所差異。然而，在“T”字旁出現的任何微弱線均都應被視為陽性結果。**

#### 請採取這些後續步驟

請配合中央流行疫情指揮中心規定執行相關的防疫措施。

#### 陰性測試結果

只有控制線(C)和沒有測試線(T)出現。這表示未檢測到SARS-CoV-2抗原。陰性測試結果表明未檢測到COVID-19抗原。對於某些COVID-19患者，此測試可能會出現偽陰性，可能需要通過分子測試進行確認。這表示即使測試結果為陰性，您仍有可能感染COVID-19。如果您測試為陰性並持續出現症狀或症狀變得更嚴重，請盡速就醫，以幫助您了解您應該採取的後續步驟。

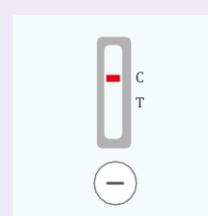


若能見到對照線(C)，但並未見到測試線(T)，測試結果則為陰性

#### 後續步驟

若你出現COVID-19徵狀或徵狀變得嚴重，請立即就醫。若你並沒有任何徵狀，或此次是連續測試計畫中的第一次測試，則必須在第一次測試後的24~48小時之間進行第二次測試。

#### 無效測試結果

控制線(C)未出現。這可能是樣本量不足或操作不正確導致的結果。請再次查看說明並使用新的檢測試劑重新測試。如果問題仍然存在，請致電購買處尋求幫助。

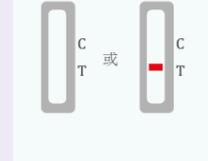

**若C旁邊沒有紅線，則無論T旁是否有紅線，結果均屬無效。**

#### 後續步驟

請用新的INDICAID妥析COVID-19新冠病毒家用快速抗原測試劑重新採樣及測試。若你出現COVID-19徵狀或徵狀變得嚴重，請立即就醫。

