

中文



掃描二維碼
可立即瀏覽
教學影片。

步驟 1

準備

步驟 2

樣本採集
唾液檢測

步驟 3

進行檢測與
檢測結果判讀

卜公-舒快版 唾液式-家用新冠病毒抗原快篩套組

PCL SELF TEST - COVID19 Ag

型號:COV04ST

使用者快速操作指引

請仔細閱讀熟悉後按照說明進行操作並參考使用下面提供的說明和圖表。



核准之使用範圍與用途：本產品為家用型檢驗試劑，利用免疫層析法，定性檢測自有或無症狀疑似感染 COVID-19 的2歲以上患者之人類唾液檢體中存在的 SARS-CoV-2 核殼蛋白抗原。陽性結果並不能排除細菌感染或與其他病毒共同感染；陰性結果不能排除 SARS-CoV-2 感染。不應單以本產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。

- 如果難以準確採集樣本，請在他人的幫助下進行。
- 請使用前，該產品應在室溫下先保存至少 20 分鐘。
- 2~13歲之兒童或青少年，應由家長協助進行測試。

製造業者名稱：PCL, Inc.


製造業者地址：#701, 99, Digital-ro 9-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08510, Republic of Korea

1




1. 使用前請徹底洗手。使用產品時建議佩戴一次性手套。

2

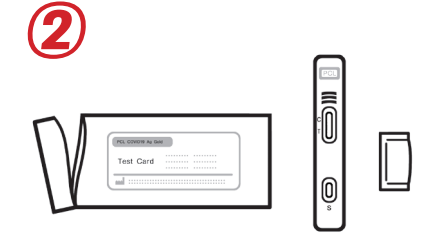


2. 在包裝袋上檢查產品的保存期限。如果保存期限已過或包裝損壞，請勿使用。

3

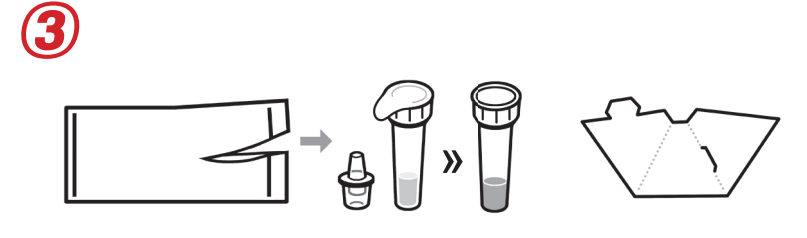

3. 打開檢測片，並檢查主要測試裝置，小心撕開萃取管的封膜。請避免將液體濺出。


4

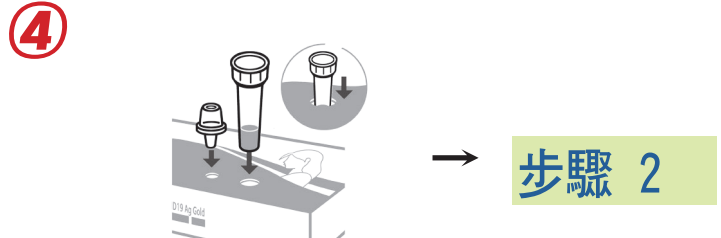

4. 將試管插入試劑盒的試管架孔中。試管固定時，小心不要翻倒試劑。


→ **步驟 2**

5

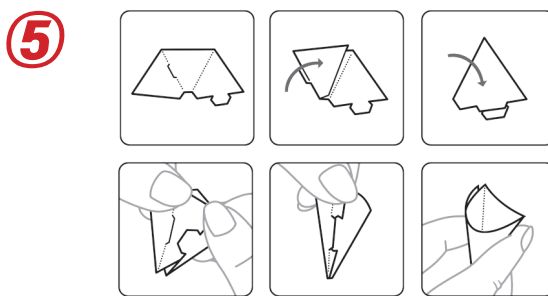


5. 準備紙漏斗並按照圖示正確組裝以避免樣本收集過程中的任何洩漏。

6

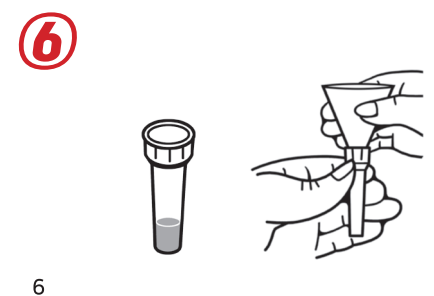


6. 從試劑盒中取出萃取管後，將組裝好的紙漏斗的尖端插入萃取管。請您小心不要溢出液體。

7

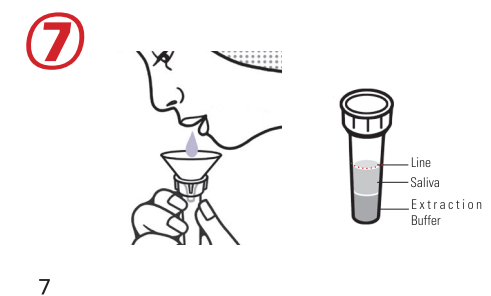

7. 將足夠的唾液含在嘴裡 30 秒，然後將其吐入管中，直至指示的 Line虛線。當心採集唾液時不要混入痰液。

8

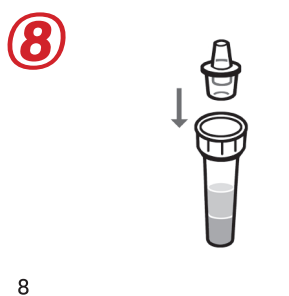

8. 用過濾蓋蓋上。確保緊密蓋上。


9



9. 如圖所示，上下翻轉試管10次

→ **步驟 3**

10

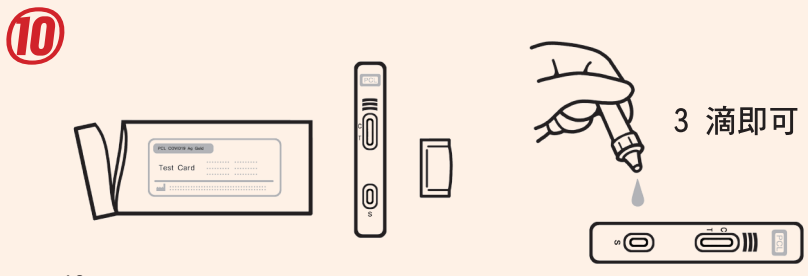

10. 將測試卡從袋中取出，放在平坦的表面上。準確地將 3 滴樣本滴在測試裝置的滴落點圓孔上。（用字母“S”標記）。

11



11. 十分鐘後判讀測試卡上的測試結果。不要超過 20 分鐘後才判讀測試結果，它可能為不正確的結果。

檢測結果判讀		陰性結果： 僅控制線(C)呈現一條紅線。陰性結果意味著未在您的樣本中檢測到SARS-CoV-2抗原。然而，此結果亦可能有偽陰性或採檢時病毒量較低無法被偵測之可能，請遵循疾病管制署防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。		檢測完成後處理動作： 1. 如檢測結果為陽性，請將本產品所有物品用塑膠袋密封包好，請配合中央流行疫情指揮中心規定執行相關的防疫措施。 2. 如檢測結果為陰性，請將本產品所有物品用塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。
		陽性結果： 呈現兩條線：控制線(C) 和 測試線(T)同時呈現一條紅線。陽性結果意味著在您的樣本中檢測到SARS-CoV-2抗原，表示您可能感染COVID-19，請配合中央流行疫情指揮中心規定執行相關的防疫措施。 *即使測試線(T)僅出現微弱反應，仍應視為陽性反應。		