

“優美思”家用新冠病毒抗原快篩檢測套組使用操作 Humasis COVID-19 Ag Home Test Operation Manual 防疫專案核准輸入第1110011033號



操作說明影片

本指引適用於Humasis COVID-19 Ag Home Test在使用此測試之前，請詳細閱讀使用說明


核准之使用範圍與用途：

本產品為家用型檢驗試劑，利用免疫層析法定性檢測疑似感染COVID-19患者鼻腔檢體中存在的SARS-CoV-2核殼蛋白抗原。3歲以上至未滿18歲兒童及青少年須由家長協助採集鼻腔檢體。本檢驗結果僅提供初步篩檢結果，不能做為診斷的唯一依據。陽性結果並不能排除與其他病原體共同感染。陰性結果不能排除SARS-CoV-2感染。不應單以本產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。

注意：

1. 本產品僅供體外檢測使用，不應單憑檢測結果作為感染與否的依據，須配合專業醫師諮詢來做判定。檢測結果仍須經由專業醫師診斷作為最終判定。
2. 檢測結果如為陽性，請配合中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。

操作前注意事項

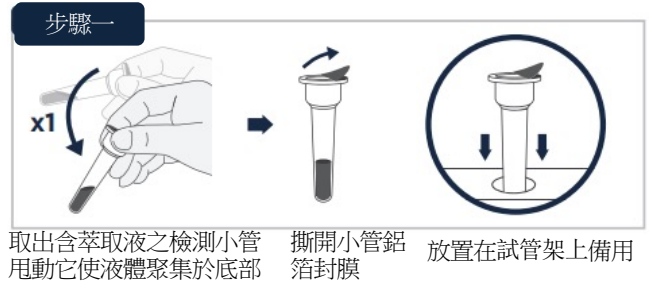


步驟二

擦拭鼻腔採集樣本：不正確的擦拭可能導致測試結果不準確。如您無症狀，這點尤為重要




步驟三

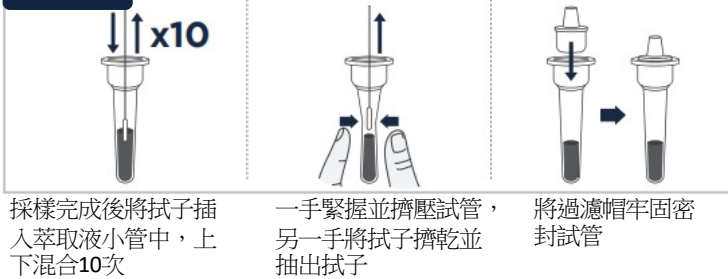

步驟四




步驟五

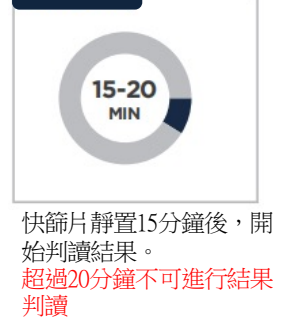


結果判讀



陰性

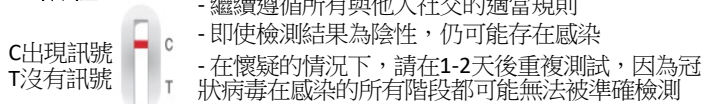

陽性

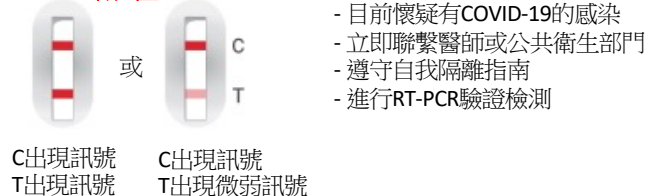

無效檢測

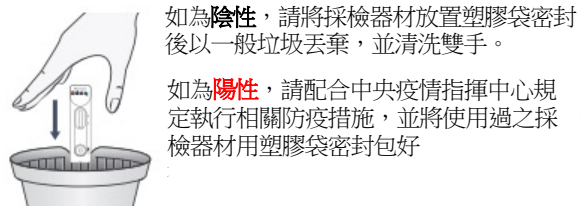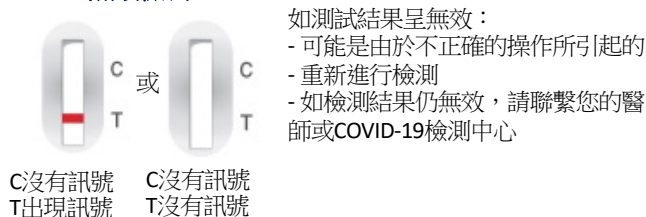

IVD: For in vitro diagnostic use
Consult instructions for use
Authorized Representative

LOT: Lot number
Store at 2-30°C
Manufactured by

REF: Catalogue number
Do not reuse
Use by / Expiry date

製造業者名稱及地址：
Humasis Co., Ltd.
Rm. 114, 502, 504, 604, 604-1, B03-2, 88, Jeonpa-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14042, Republic of Korea
TEL: +82-31-478-8597, FAX: +82-31-478-8586
Email: question@humasis.com
www.humasis.com

醫療器材商名稱及地址：
艾慕思生物科技股份有限公司
AMESDATA BIOTECH CO., LTD.
台北市114064內湖區洲子街46號6樓
客服電話：0800-888-849
www.amesdata.com.tw