

涎捕快-新冠病毒抗原家用唾液快速檢測試劑

PCL SELF-TEST- COVID19 Ag

防疫專案核准輸入第 1111608379 號

簡易操作指引

醫療器材商名稱：醫達科技股份有限公司

醫療器材商地址：新北市汐止區康寧街 151 號 2 樓

諮詢專線：02-77087737

型號：COV04ST 製造商：PCL, Inc.

製造商地址：#701, 99, Digital-ro 9-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08510, Republic of Korea



操作影片 QR CODE

核准之適用範圍及用途：

本產品是家用型唾液快篩檢測試劑。基於免疫層析法原理，定性檢測有症狀或無症狀疑似感染 SARS-CoV-2 的 2 歲以上患者唾液中的 SARS-CoV-2 核殼蛋白抗原。陽性結果並不能排除細菌感染或與其他病毒共同感染；陰性結果不能排除 SARS-CoV-2 感染。不應單以本產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。

○使用前詳閱操作手冊/影片，該產品應在室溫下至少 20 分鐘後再測試。

○若難以準確採集唾液樣本，請在其他人員協助下進行。

○2~13 歲之兒童或青少年，應由家長/監護人協助進行測試。

產品組件



滴管




紙漏斗



滴管蓋

使用說明書

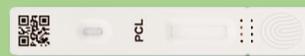

測試卡

1. 使用前準備




洗手

檢查
保存期限



放置滴管蓋及滴管

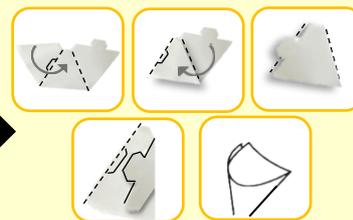


將紙漏斗組裝完成

2. 唾液採集




取組裝好的紙漏斗

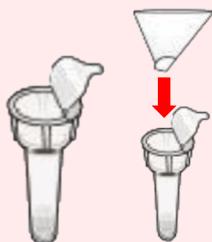

打開鋁膜後將紙漏斗放在滴管上



將足夠的唾液含在嘴裡 30 秒，吐入唾液至滴管標準線。注意採集唾液時不要混入痰液。

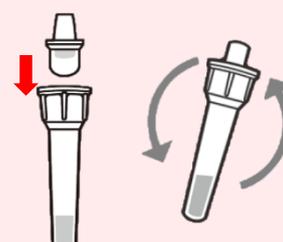

蓋上滴管蓋並且搖晃 10 次

3. 進行檢測



將滴管中的樣本滴 3 滴至圓孔



等待 10 分鐘

判讀結果

※不要超過 20 分鐘判讀結果，可能為不正確的結果。

4. 結果判讀

陽性結果 控制線(C)和測試線(T)同時呈現一條紅線。表示在您的樣本中檢測到 SARS-CoV-2 抗原，表示可能感染 COVID-19。請遵循中央流行疫情指揮中心規定執行相關防護措施。

※測試線(T)出現微弱反應(淡粉色)，仍應視為陽性反應



陰性結果 僅控制線(C)呈現一條紅線。陰性結果表示未在您的樣本中檢測到 SARS-CoV-2 抗原。然而，此結果亦可能有偽陰性或採檢時病毒量較低無法被偵測之可能，請遵循疾病管制署防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。



無效檢測 控制線(C)未呈現一條線。可能為檢測程序不正確而導致，建議請重新進行檢測。

使用後之處理辦法：

1. 如檢測結果為陽性，請將本產品所有物品用塑料袋密封包好，請遵循中央流行疫情指揮中心規定執行相關防護措施。
2. 如檢測結果為陰性，請將本產品所有物品用塑料袋密封包好，以一般垃圾處理。