

盧西拉家用**確可易**新型冠狀病毒核酸檢測試劑

Lucira™ CHECK✓IT COVID-19 Test Kit

防疫專案核准輸入第 1106605687 號

核准之使用範圍與用途：

本產品為一次性檢測套組，利用分子擴增技術定性檢驗新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的核酸。針對具有/無症狀或其他流行病學理由判定疑似感染嚴重特殊傳染性肺炎之個人，可由14歲(含)以上或由家長協助2歲(含)以上，使用鼻拭子採集鼻孔之檢體進行檢測。陽性結果並不能排除細菌感染或與其他病毒共同感染；陰性結果不能排除SARS-CoV-2感染。不應單以本產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。

注意：

- 本產品僅供體外檢測使用，不應單憑檢測結果作為感染與否的依據，須配合專業醫師諮詢來做判定。檢測結果仍須經由專業醫師診斷作為最終判定。
- 檢測結果如為陽性，請盡速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測。請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，另使用過之採檢器材，請攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。後續處置請依防疫人員指示。

醫療器材商名稱: 達亞國際股份有限公司

醫療器材商地址: 桃園市龜山區南美里南上路239號

製造業者名稱: Lucira Health, Inc.

製造業者地址: 1412 62nd Street Emeryville, CA 94608 United States

盧西拉家用**確可易**新型冠狀病毒核酸檢測試劑 Lucira™ CHECK✓IT COVID-19 Test Kit

中文使用說明書

一個測試試劑盒為 1 人 1 次使用, 勿重複使用

使用操作說明


- 選在一個可以執行此檢測 30 分鐘不受干擾的位置。
- 使用前，仔細閱讀所有說明再執行檢測。
- 還沒準備好執行檢測先不要將電池插入測試裝置。
- 檢測套件包含：
中/英文說明書，2 顆 AA 電池，測試裝置（1 號袋），
樣品瓶（2 號袋），鼻拭子（3 號袋），塑膠處理袋。
- 洗手並且乾燥雙手。



洗手並擦乾

步驟 1. 設置測試

- 取出測試裝置(1 號袋)。
- 打開電池蓋放入電池，檢查就緒(READY)指示燈是否亮起？
- 取出樣品瓶(2 號袋)，撕下樣品瓶密封膜，輕輕放入測試裝置，不要往下壓。

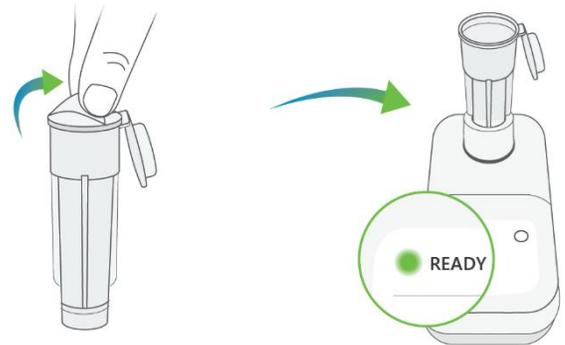


輕輕放入測試裝置
不要往下壓

! 注意：使樣品瓶遠離兒童。避免內容物接觸眼睛和皮膚。如果發生接觸，請用水沖洗。如果刺激持續存在，請就醫。

步驟 2. 採樣左右鼻孔

- !** 為了檢測正確，您必須從左右兩個鼻孔採樣。
- 取出擦拭鼻孔的鼻拭子(3 號袋)，勿碰觸棉球。
- 握住握柄末端，不讓棉球碰觸任何東西。
- 將頭向後傾斜，輕輕將鼻拭子的棉球插入鼻孔
直到棉球完全插入您/患者的鼻孔內，並覺得有滯礙感。

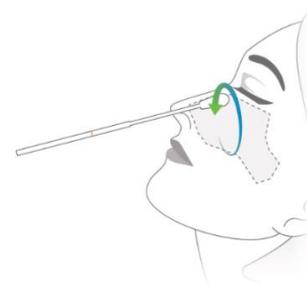

左右兩個鼻孔取
樣都旋轉 5 圈

! 注意：2-13 歲的兒童及青少年須由家長採樣。

- 將鼻拭子在鼻孔的內壁滾動 5 圈，棉球必須在拭子滾動時接觸鼻孔周壁。
- 在另一邊鼻孔重複相同步驟。

步驟 3. 攪拌拭子並運作測試

- 將拭子棉球插入樣品瓶中觸及底部。
- 拭子在樣品瓶中攪拌 15 圈來混合樣品。
- 丟棄鼻拭子。
- 蓋緊樣品瓶帽蓋，往下推進樣品瓶到測試裝置中，直到發出喀噠聲。
- 測試開始進行時，就緒指示燈開始閃爍。

如果就緒指示燈在 5 秒內沒有閃爍，請使用手掌再次按壓樣品瓶以開始測試。

- 一旦測試開始運作，請勿移動測試裝置。

 等待 30 分鐘。



步驟 4. 讀取結果

- 30 分鐘測試完成後，將顯示完成(Done)指示燈。
- Positive 旁燈亮，表示陽性結果。
- Negative 旁燈亮，表示陰性結果。
- 所有的燈亮，表示不正確結果，需重測。

<input type="radio"/> Ready <input checked="" type="radio"/> Done COVID-19 <input checked="" type="radio"/> Positive <input type="radio"/> Negative	<input type="radio"/> Ready <input checked="" type="radio"/> Done COVID-19 <input type="radio"/> Positive <input checked="" type="radio"/> Negative	<input checked="" type="radio"/> Ready <input checked="" type="radio"/> Done COVID-19 <input checked="" type="radio"/> Positive <input checked="" type="radio"/> Negative
陽性結果 陽性燈號亮	陰性結果 陰性燈號亮	不正確結果 所有燈號閃爍

 請將測試結果拍照留存，並配合國內防疫政策。

十 如果測試是陽性

您很有可能已感染 COVID-19，請立即至鄰近的社區採檢院所進一步檢測。請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，另使用過之採檢器材，請攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。後續處置請依防疫人員指示。

一 如果測試是陰性

陰性結果意味著導致 COVID-19 的病毒未在您的樣本中找到。但是，此檢測可能會給某些患有 COVID-19 的人提供不正確的（偽陰性）的陰性結果。這意味著即使測試為陰性，您可能仍可能擁有 COVID-19。如果是這樣的話，醫事人員將考慮檢測結果與您其他方面的病史，如症狀和可能的接觸史，以決定如何照顧你。重要的是，您與醫事人員的合作，以瞭解您應該採取的下一步行動。

步驟 5. 丟棄測試套件

- 測試完成後，如檢驗結果為陽性，請將檢體及檢測裝置妥善密封，攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。
- 測試完成後，如檢驗結果為陰性，請將檢體及檢測裝置放在塑膠處理袋中密封包好，以一般垃圾處理。

! 建議：看一次使用教學影片再進行檢測，確保操作正確



中文影片

或 <https://youtu.be/R7USXJNiv1s>



English Video

或 <https://youtu.be/GVgRfK32qQ0>

技術支援及客服電子郵件信箱: covid.19@deltaasia.com.tw